

Le protocole

Le kit UriPep® comprend 5 éléments :

- 1 tube monovette avec embout,
- 1 tube protecteur de transport en plastique,
- 1 demande d'analyse à compléter,
- 1 protocole indiquant toutes les étapes à suivre,
- 1 enveloppe pré affranchie adressée à LAB1


Avant de récolter l'échantillon

- 1- **Il est impératif de collecter la 1^{ère} urine du matin.**
- 2- Durant les 2 semaines avant d'effectuer le test, il est important d'avoir une alimentation variée et de consommer du gluten ainsi que du lait de vache.
- 3- Pour les adultes, 24h avant le test, ne pas boire plus de 3 verres d'eau de 250ml. La veille de la collecte de l'urine, ne pas boire plus de 250ml de liquide après 20h.
- 4- Ne pas collecter l'urine pendant la période menstruelle.

La récolte de l'échantillon

- 1- Préparer le dispositif avant le prélèvement de l'échantillon. Incrire votre nom, prénom et numéro d'identification (indiqué sur la demande d'analyse) sur l'étiquette autocollante et la coller sur le tube de prélèvement.

Attention : Le tube de prélèvement contient une poudre blanche dans la partie supérieure. Il s'agit du stabilisateur. Ne pas le jeter et ne pas dévisser le bouchon de la seringue.

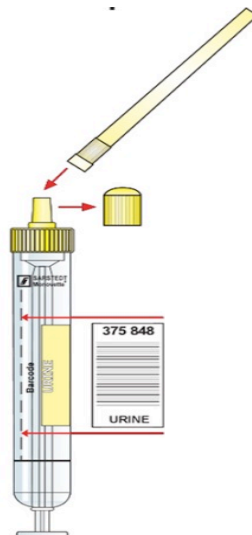


- 1- Prendre un récipient stérile (non inclus dans le kit) et le remplir avec la 1^{ère} urine du matin.



- 2- Insérer la pointe de la monovette dans le récipient et remplir complètement le tube de prélèvement.


Cela doit être fait dans les 5min sinon le test ne sera plus valide.

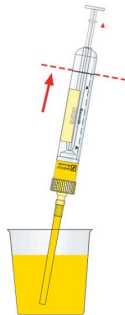

- 3- Remuer le tube de prélèvement contenant l'urine 5 à 10 fois.



- 4- Retirer la pointe **jaune** de la monovette, casser **le piston** et jeter le tout dans la poubelle. Remettre le petit bouchon jaune et placer le tube de prélèvement dans le tube de transport en plastique.

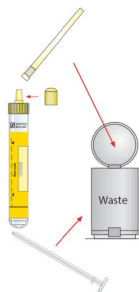

L'envoi du prélèvement

- 1- Complétez et signez la demande d'analyses. **N'oubliez d'y renseigner votre date de naissance**
- 2- Placez l'échantillon recueilli et la demande d'analyses dans l'enveloppe adressée à LAB1.
- 3- Fermer l'enveloppe déjà affranchie et envoyez là au laboratoire d'analyses le jour même